


QUEENSKIN GmbH
+ SABAMED-EIN TEAM

aesthetic innovations



Service-Telefon: 044 · 56877139





Das professionelle *Spektrum* für die *ästhetische Praxis*.

Mesotherapie

Mesotherapeutische Cocktails von Aesthetic Dermal (transdermal)	09 - 11
Mesotherapeutische Cocktails von RRS® (Medizinprodukte)	12 - 15
Mesotherapeutische Einzelwirkstoffe	16 - 17
Fadenlifting mit PDO-Fäden	18 - 19
PRP – Platelet Rich Plasma Therapie	20

Peeling

AHA Fruchtsäurepeeling	22
Phenol TCA Peeling	22
Easy TCA	23
Starkes TCA PPM	23

Pflegeprodukte

Postpeel- und Tagespflege von SKINTECH	24 - 25
--	---------

Hyaluronsäure Filler / Masken

Hyaluronsäure Filler von Princess®	26
Masken von Princess®	27

Geräte / Praxisausstattung

Mesotherapie-Pistolen	28 - 31
ExcellDerm Radiofrequenztherapie	32 - 33
Micro-Dermabrasion	34 - 35
Elektroporation	36
Tattoo-Entfernung mit T.E.P.R.	37
Meso-Roller	38 - 39
Elektrisches Micro-Needling	40
RUMI Homecare	41

Von Ihrer Indikation ...

... zum richtigen Produkt

Indikation	Art	Produktlinie	Produkt	Seite		
Anti-Aging	allgemein	RRS	alle	S. 14/15		
		Reparestim	alle	S. 8-11		
		Peeling	alle	S. 20/21		
		Pflege	alle	S. 24/25		
		Wirkstoffe	alle	S. 16/17		
		Princess	alle	S. 26		
		Geräte	alle	S. 28-41		
		Fäden	alle	S. 18/19		
Akne	Vulgaris, Comedonica, Inversa, Papulopustulosa, Conglobata, Tarda	RRS		S. 14/15		
		Reparestim		S. 8-11		
		Peeling	Easy Phytic, Easy-Droxy, Easy-TCA, Easy-TCA Pain	S. 20/21		
		Pflege	Purifying Creme, Purifying Gel, Vit. E, Sunblock	S. 24/25		
		Wirkstoffe	Dermastabilon	S. 16/17		
		Geräte		S. 28-41		
		PRP	PRP	S. 20		
		Aknenarben	Gesicht und Körper	RRS	Hyalift 35, Hyalift 75,	S. 14/15
Reparestim				S. 8-11		
Peeling	Easy-TCA, Easy-TCA Pain, Unideep			S. 20/21		
Pflege	Vit. E, Sunblock, ACE-Renutrive			S. 24/25		
Wirkstoffe	Purascorbol, Poretinol			S. 16/17		
Geräte	Pen, Roller, Pistole, Abrasion			S. 28-41		
PRP	PRP			S. 20		
Aufhellung	Melasma, Cloasma, Hyperpigmentation			RRS	Whitening	S. 14/15
		Reparestim	Whitening	S. 9		
		Peeling	ETCA, ETCA Pain, Unideep, Phenol-Light	S. 20/21		
		Pflege	Belinding Beaching	S. 24/25		
		Wirkstoffe	Purascorbol, Poretinol, Biotin	S. 16/17		
		Geräte	Pen, Roller, Excellderm, Lift-Skin, Pistole	S. 28-41		
		Augen	Tränensäcke, Augenringe, Fältchen Fettpolster	RRS	Eyes, Hyalift 75 Proactiv, Skin-Relax	S. 14/15
				RRS	Cellutrix	S. 14/15
Reparestim	Eyes, Eyes Serum, Bonta 568			S. 10/11		
Peeling	Lip&Eyelid, Easy-TCA Pain, Unideep,			S. 20/21		
Pflege	Actilift			S. 24/25		
Wirkstoffe	DM-Lift			S. 16/17		
Schwellungen Fettpolster	Wirkstoffe		Melirutol	S. 16/17		
	Wirkstoffe		Dermastabilon	S. 16/17		
	Geräte		Pen, Excellderm, Lift-Skin	S. 28-41		
	Fäden		MP	S. 18/19		
	PRP		PRP	S. 20		
	Cellulite			RRS	Cellutrix	S. 14/15
Reparestim		Cellulite		S. 10		
Peeling				S. 20/21		
Pflege				S. 24/25		
Wirkstoffe		Dermastabilon, Deoxylyse, Silorg, Silorgamin, L-Carnitin, K-Bromine, Desinfiltral		S. 16/17		
Princess				S. 26		
Geräte		Pen, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen		S. 28-41		
PRP		PRP		S. 20		
Falten	Gesicht	RRS	Hyalift 35/75, Hyalift Proaktiv, Tensor Lift	S. 14/15		
		Fältchen	Reparestim	HA	S. 8	
		Peeling	Easy-Phen light, Lip&Eyelid	S. 20/21		
		Pflege	Actilift	S. 24/25		
		Wirkstoffe	DM-Lift	S. 16/17		
		Princess	Filler, Volume	S. 26		
		Geräte		S. 28-41		
		Fäden	alle	S. 18/19		
		PRP	PRP	S. 20		
		Mund	Mundfältchen	RRS	Hyalift 35, Hyalift 75, Injectable, Skin-Relax	S. 14/15
Reparestim	Reparestim HA, Bonta 568			S. 8+10		
Peeling	Lip&Eyelid			S. 20/21		
Pflege	Actilift, Vit. E, Sunblock			S. 24/25		
Lippenrand, Lippenrot	Wirkstoffe		DM-Lift	S. 16/17		
	Princess		Filler, Volume	S. 26		
	Geräte		Pen, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen	S. 28-41		
	Fäden		MP, Twin	S. 18/19		
	PRP	PRP	S. 20			



Indikation	Art	Produktlinie	Produkt	Seite		
Hals, Dekolleté	Straffung, Hautbild	RRS	Hyalift 35, Hyalift 75, Injectable, Tensor-Lift, Silisor-Tensor	S. 14/15		
		Reparestim	Reparestim HA	S. 8		
		Peeling	Easy-TCA, Unideep	S. 20/21		
		Pflege	Actilift, Vit. E, Sunblock	S. 24/25		
		Wirkstoffe	DM-Lift, Silorgamine	S. 16/17		
		Princess	Rhich	S. 26		
		Geräte	Pen, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen	S. 28-41		
		Fäden	MP, MAG	S. 18/19		
		PRP	PRP	S. 20		
		Haare	androgenetisch	RRS	XI- Hair	S. 14/15
Reparestim	Hair, Hair DC			S. 9		
Peeling				S. 20/21		
Pflege				S. 24/25		
Wirkstoffe	K-Bromine , Biotin, Cynalcan, Dexenol, Purotinol			S. 16/17		
Princess				S. 26		
Geräte	Pen, Roller, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen			S. 28-41		
PRP	PRP			S. 20		
PRP	PRP			S. 20		
Lifting	Mesolifting, Liquidlifting, Fadenlifting			RRS	Hyalift, Hyalift 75 Proactive, Tensor-Lift, Cellutrix, Strimatrix, Skin Relax, Silisorg Tensor, Injectable	S. 14/15
		Reparestim	Stretchmarks, Cellulite, Bonta 568, HA	S. 8-11		
		Peeling	Lip&Eyelid	S. 20/21		
		Pflege	Actilift	S. 24/25		
		Wirkstoffe	DM-Lift, Desinfiltral, Purotinol, Silorgamine	S. 16/17		
		Princess	alle	S. 26		
		Geräte	alle	S. 28-41		
		Fäden	MP, COG, Twin	S. 18/19		
		PRP	PRP	S. 20		
		Lipolyse	Gesicht, Hals, Bauch Beine Po, Arme	RRS	Cellutrix	S. 14/15
Reparestim	Cellulite			S. 10		
Peeling				S. 20/21		
Pflege				S. 24/25		
Wirkstoffe	Dermastabilon, Deoxylyse, Silorg, Silorgamin, L-Carnitin, K-Bromine			S. 16/17		
Princess				S. 26		
Geräte	Pen, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen			S. 28-41		
Pflege	Belnding Beaching			S. 24/25		
Narben, Dehnungsstreifen	Gesamter Körper			RRS	Strimatrix, Hyalift 35, Hyalift 75	S. 14/15
				Reparestim	Stretchmarks	S.11
		Peeling	Easy-TCA, Unideep	S. 20/21		
		Pflege	Actilift	S. 24/25		
		Wirkstoffe	Purascorbol, Purotinol	S. 16/17		
		Princess	Rhich	S. 26		
		Geräte	Pen, Roller, Excellderm, Lift-Skin, Pistolen	S. 28-41		
		Fäden	MP	S. 18/19		
		PRP	PRP	S. 20		
			Fettpolster	Wirkstoffe	Dermastabilon	S. 16/17
Tatoo-Entfernung	Gesamter Körper	RRS		S. 14/15		
		Reparestim		S. 8-11		
		Peeling		S. 20/21		
		Pflege	Ipilase, Vit. E, Sunblock	S. 24/25		
		Wirkstoffe		S. 16/17		
		Princess		S. 26		
		Geräte	Magic-Pen	S. 37		
		Fäden		S. 18/19		
		PRP		S. 20		





SKIN  TECH
advanced skin technologies

 Aesthetic Dermal

RRS[®]


CROMA
HEALTH • CARE • INNOVATION


Princess[®]

Von der *Kunst* sich in seiner Haut *wohlzufühlen*.

Gutes Aussehen wird verbunden mit Vitalität, Gesundheit vor allem aber mit Erfolg. Um perfekt auszusehen, ist manchem jedes Mittel Recht. Oft schießen die „Korrekturen“ allerdings über ihr Ziel hinaus und nehmen bisweilen mittelschwere chirurgische Ausmaße an. Der Preis den man zu zahlen hat, ist nicht nur für den Körper hoch.

Die Haut ist unser größtes Sinnensorgan. Mit Sinnensorganen sollte man immer „sinnvoll“ umgehen. Genau aus dieser Erkenntnis heraus hat sich die **ästhetische Mesotherapie** entwickelt. Sie sorgt dafür, dass Überkorrekturen unmöglich werden und sich Menschen egal welchen Alters sich in ihrer Haut wohlfühlen. Genau dieses „Wohlfühlen“ ist Ihr Produkt.

Um Sie bei der Sicherstellung Ihrer Leistung optimal zu unterstützen bietet **Luventas-Medical** ausschließlich **bewährte, tierversuchsfreie Produkte** namhafter Europäischer Hersteller an. **Alles, was Sie für den professionellen Praxisbetrieb benötigen, gibt's bei uns** – professionelle Beratung inklusive.

*Mit der richtigen Therapie sieht Ihre
Haut „natürlich“ jünger aus.*



Aesthetic Dermal

*15 Jahre Erfahrung.
Mesotherapie Cocktails und ...
... Daily Care von Aesthetic Dermal.*

Hydration

Die Mesotherapie Cocktails von **Aesthetic Dermal** haben sich in der Praxis bestens bewährt. Sie sind jederzeit miteinander kombinierbar und stellen so die Ansprüche Ihrer Patienten an eine individuelle Therapie sicher.

Aesthetic Dermal bietet Qualität auf die Sie sich verlassen können.



61 aktive Inhaltsstoffe + HA



Regeneration

Reparestim HA® TD (6 x 5 ml)
zur Regeneration

- bei alternder bzw. reifer Haut, feinen Fältchen
- bei matter, müder und atonischer Haut
- bei Schädigungen durch Umwelteinflüsse (Wind/Wetter/UV/Rauchen)
- bei Schädigungen durch operative Eingriffe

Reparestim HA® TD ist eine sterile Lösung und frei von Konservierungsstoffen. Sie kann mit allen gängigen ätherischen Behandlungen (Botulinumtoxin, Filler, Laser) kombiniert werden.

61 aktive Inhaltsstoffe + HA
10 x Vitamine, 12 x Spurenelemente, 3 x Fettsäuren,
19 x Aminosäure, 16 x Antioxydanten, 2 x Co-Enzyme

Volumen pro Sitzung:
2,5 ml Bereich / max. 5 ml Behandlung
1 Behandlung / Woche - durch. 4-6 Behandlungen
Wiederholung 1 - 2 x pro Jahr

Reparestim HA® DC
Daily Care-Produkt zur Therapie -Unterstützung

15 ml Spender





Hair

Schon ein Tropfen wirkt!

- bei symptomatischem Haarverlust
- empfohlen nach Schwangerschaft/Stillzeit, Stress, unausgeglichene Diäten, Mangelernährung etc.
- erfolgreich kombinierbar mit allen invasiven/nicht invasiven Behandlungen und Geräten.

47 aktive Inhaltsstoffe + HA



Hellt auf und pflegt bei Hyperpigmentation und Melasma

10 aktive Inhaltsstoffe + HA



siehe auch XL-Hair!

Reparestim® Hair TD (8 x 5 ml)
bei starkem Haarausfall

- zum Stoppen des Haarausfalls
- zur Förderung des Haarwachstums
- zur präventiven oder unterstützenden Pflege
- zur Vorbehandlung bei Haartransplantationen
- für Männer und Frauen geeignet

Reparestim Hair® TD ist ein kapillarer Regenerator zur Revitalisierung kapillarer Fasern. Essentielle Nährstoffe und spezielle Peptide werden angereichert, um das Haarwachstum zu stimulieren.

47 aktive Inhaltsstoffe + HA

1 x FGF, 10 x Vitamine, 3 x Flavonide, 2 x Terpenoide
17 x Aminosäure, 2 x Fettsäure, 4 x Nukleotide,
7 x Spurenelemente

Volumen pro Sitzung:

2,5 ml Bereich / max. 5 ml Behandlung
1 Behandlung / Woche - durch. 4-8 Behandlungen
Wiederholung 1 - 3 x pro Jahr

Reparestim® Hair DC
Daily Care-Produkt zur Therapie -Unterstützung

50 + 50 ml Spray



Reparestim® Whitening TD (5 x 5 ml)

- zur Bleichung der Haut
- zur Erhöhung des epidermalen Wachstums
- zur Verbesserung der Hydratation
- zur Verbesserung der Elastizität
- mit Antioxidanseeffekt

Reparestim® Whitening TD ist eine sterile Lösung und frei von Konservierungsstoffen. Sie wird zur Bleichung der Haut und für eine gleichmäßige Hautfarbe eingesetzt.

10 aktive Inhaltsstoffe + HA

Arbutin C, Albatin, Tocoph. Acetat, Dexpanthenol, Retinol, Ascorby Phosph., Morus Alba, Licorice Extrakt, Kojic Acid, Lactic Acid, Etoxydiglycol

Volumen pro Sitzung:

1,5 ml Bereich / max. 5 ml Behandlung
1 Behandlung / Woche - durch. 4 Behandlungen
Wiederholung wenn nötig

Mesotherapie *Cocktails und ...*
... Daily Care von Aesthetic Dermal

Cellulite

Relax



*stärkste Konzentration
 von Peptiden (3 x 20%)
 zur Muskelentspannung.*

10 aktive Inhaltsstoffe + HA

Reparestim® Cellulite TD (5 x 10 ml)

- zur Reduzierung von Orangenhaut
- zur Verbesserung des Hauttonus
- zur Verminderung von Wasserüberschuss in der Haut
- mit Antiradikal-Effekt

Reparestim® Cellulite TD ist eine Lösung zur Behandlung von Orangenhaut, zur Förderung der oberflächlichen Blutzirkulation, zur Durchfeuchtung/Ernährung der Haut, zur Förderung der Hautfestigkeit/Elastizität

10 aktive Inhaltsstoffe + HA

Koffein, Troxerutin, Cynara Scolimus, Organic Silizium, L-Carnitine, Centella Asiatica, Focus Vesiculosus, Hedera Helix, Ruscus Aculeatus

Volumen pro Sitzung:

10 ml Bereich / max. 20 ml Behandlung
 1 Behandlung / Woche - durch. 4-6 Behandlungen
 Wiederholung 1 - 3 x pro Jahr

BoNtA 568® (5 x 5 ml)

bei durch Muskelkontraktion bedingter Faltenbildung

- zur Glättung von kleinen Falten, die durch Muskelkontraktionen entstanden sind
- vorbeugend gegen Faltenbildung
- für effektive Ergebnisse

BoNtA 568® mit beta-tox Prolongator ist eine synergetische, hochkonzentrierte Verbindung von drei Polypeptiden, welche kleine Falten glättet, die durch Muskelkontraktionen entstanden sind.

3 aktive Inhaltsstoffe

Pentapeptid, Hexapeptid, Octapeptid

Volumen pro Sitzung:

2,5 ml Bereich / max. 5 ml Behandlung

BoNtA 568® DC

Daily Care-Produkt zur Therapie -Unterstützung

15 ml im Spender





transdermal

Eyes

Dehnungsstreifen

Auch zur Narbenreduktion



Reparestim® Eyes TD (5 x 3 ml)

- zur Reduktion geschwollener Augen
- zur Reduktion von Augensäcken
- für eine gleichmäßige Augenkontur
- zur Verbesserung der Hautelastizität
- mit Aufhellungseffekt und Antioxidans

Reparestim® Eyes TD ist eine sterile Lösung und frei von Konservierungsstoffen. Sie kann mit allen gängigen ätherischen Behandlungen (Botulinumtoxin, Filler, Laser) kombiniert werden.

11 aktive Inhaltsstoffe + HA

Vitamin C, Troxerutin, Ruscus, Citrus, Solidago, Dipeptide-2, PeptidePal-CQPR, Aesculus, Melilot, Resveratrol, Organische Silizium

Volumen pro Sitzung:

0,75 ml Bereich / max. 3 ml Behandlung
1 Behandlung / Woche - durch. 4-6 Behandlungen
Wiederholung 1 - 3 x pro Jahr

Reparestim® Eyes DC

Daily Care-Produkt zur Therapie -Unterstützung

15 ml im Spender



Reparestim® Stretchmarks TD (5 x 10 ml)

- zur aktiven Verbesserung neuer Hautzellen
- zur Verbesserung der interzellulären Matrixqualität, der Hautqualität und -dicke
- Wirkung als Immunmodulator
- antioxidative Wirkung

Reparestim® Stretchmarks TD verbessert die Reepithelisation, Spannkraft und Elastizität der Haut, sowie das Hautvolumen und die Hydratation.

10 aktive Inhaltsstoffe + HA

Nano bFGF, Vitamin C, Organische Silizium, Polynukleotide DNA, Centella Asiatica, Soyabohnen Extr., Polyphenole, Mineralsalze (Ca-Mg-P-I-K-Co-Zn-Mn-Al-Fe), Vitamine (B1-B2-PP-D)

Volumen pro Sitzung:

5 ml Bereich / max. 10 ml Behandlung
1 Behandlung / Woche - durch. 4-6 Behandlungen
Wiederholung 1 - 3 x pro Jahr



 Aesthetic Dermal





injectable

- *Höhere Qualität*
- *Bessere Effektivität*
- *Größere Sicherheit*

RRS®



Eine ganze Produktfamilie ...
... zur optimalen Biorevitalisierung

Die RRS®-Product-Range ist die Quintessenz aus wissenschaftlicher Erkenntnis und technologischem Fortschritt. RRS® Produkte haben sich im Praxisbetrieb 1.000-fach bewährt. Die Original RRS® Rezepturen eignen sich bestens für die Injektion und bieten dem behandelnden Arzt höchste Sicherheit, Top Qualität und Effektivität. Reinheit bei der Herstellung und optimale Inhaltsstoffe stellen die synergetische Wirkung sicher.

Die RRS®-Product-Range ist breit aufgestellt. Drei Produktfamilien bieten insgesamt vierzehn unterschiedliche Produkte, die je auf die individuellen Bedürfnissen des Patienten abgestimmt werden können.

Die RRS®-Product-Range kommt bei unterschiedlichsten Injektionstechniken zum Einsatz. Alle Präparate können in der Nappage-Technik, Quaddel-Technik oder Tunnel-Technik verabreicht werden.










RRS®

*Die Produktlinie für
sichere Behandlungserfolge*

RRS®				
Mesotherapie-Cocktail Medizinprodukte CE Class III				
	Präparat	Größe	Indikation	Packungsinhalt
	RRS® HYALIFT®35 Nicht vernetzte Hyaluronsäure* 35 mg	Box Small	Haut Anti-Aging Regenerations-Stimulator für müde, atonische Haut mit feinen Fältchen. Resorbierbare, nicht vernetzte Hyaluronsäure zum Auffüllen der oberflächlichen Dermis in Verbindung mit einer dermalen Revitalisierung und Hydratation. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 25 und 35 Jahren	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		6 Amp. / 5 ml
		Box Large		12 Amp. / 5 ml
	RRS® HYALIFT®75 Nicht vernetzte Hyaluronsäure* 75 mg	Box Small	Haut Anti-Aging Regenerations-Stimulator für ältere, müde, atonische Haut mit feinen Fältchen. Höher konzentrierte, resorbierbare, nicht vernetzte Hyaluronsäure zum Auffüllen oberflächliche Falten in Verbindung mit einer dermalen Revitalisierung und Hydratation. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 35 und 45 Jahren	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		6 Amp. / 5 ml
		Box Large		12 Amp. / 5 ml
	RRS® HYALIFT®75 PROACTIVE Nicht vernetzte Hyaluronsäure* 75 mg + Biorevitalisierungskomplex	Box Small	Haut Anti-Aging Regenerations-Stimulator für ältere, müde, atonische Haut mit feinen Fältchen. Höher konzentrierte, resorbierbare, nicht vernetzte Hyaluronsäure zum Auffüllen oberflächlichen Falten in Verbindung mit einer dermalen Revitalisierung und Hydratation, unterstützt durch eine Biorevitalisierungslösung, die Resveratol und Aminosäuren enthält. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 45 und 55 Jahren	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		6 Amp. / 5 ml
		Box Large		12 Amp. / 5 ml
	RRS® HA INJECTABLE unvernetzte Hyaluronsäure 6 mg pro ml + Biorevitalisierungskomplex	Box Small	Anti-Aging Hautimplantat für Raucherhaut, gealterte, devitalisierte, gestresste Haut. Für Haut, die starken Umweltbelastungen ausgesetzt ist. Interdermales Implantat aus 30 mg unvernetzter, resorbierbarer Hyaluronsäure verbunden mit einer Biorevitalisierungslösung für einen besseren Anti-Aging Effekt. Sehr hohe Hydratation. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		6 Amp. / 5 ml
		Box Large		12 Amp. / 5 ml
	RRS® HA TENSOR LIFT Nicht vernetzte Hyaluronsäure* 30 mg + Biorevitalisierungskomplex + DMAE	Box Small	Für Anti-Aging Meso-Behandlungen, Hautlifting, Kollagen Elastin Booster. Dermal resorbierbares Implantat zum kurzfristigen Auffüllen von oberflächlichen Falten in Verbindung mit einer dermalen Anti-Aging Revitalisation und einem Hautstraffungseffekt. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 35 und 55 Jahren	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		6 Amp. / 5 ml
		Box Large		12 Amp. / 5 ml
	RRS® HA SKIN RELAX WITH BoNta 568® Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Oligopeptide (Agiriline, Syn-Ake, Hexapeptide-8)	Box Small	Für Anti-Aging Meso-Behandlungen bei müder Haut. Dermaler Fülleffekt (HA) + dermaler Entspannungseffekt. Zur Glättung von kleinen Falten, die durch sich wiederholende Muskelkontraktionen entstanden sind. β-tox Prolongator. Für Gesichtsmimik und Dekolleté · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	2 Amp. / 3 ml
		Box Medium		6 Amp. / 3 ml
		Box Large		12 Amp. / 3 ml
	RRS® HA WHITENING Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Biorevitalisationskomplex + Aufhellungsfaktoren	Box Small	bei sonnengeschädigter Haut, Melasma & Chloasma, Hautaufhellungseffekt, Mesotherapeutische Hautfarbenregulation. Dermal resorbierbares Implantat für sonnengeschädigte Haut, gegen Photo-Aging, Hautaufhellungs-Modulations-Effekt. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	2 Amp. / 3 ml
		Box Medium		6 Amp. / 3 ml
		Box Large		12 Amp. / 3 ml



injectable


RRS®				
Mesotherapie-Cocktail Medizinprodukte CE Class III				
	Präparat	Beschreibung	Indikation	Packungsinhalt
	RRS® HA EYES Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Biorevitalisationskomplex + Aufhellungsfaktoren	Box Small	Zur Verbesserung der Augenkonturen, bei oberflächlichen Falten um die Augen, dunklen Augenringen und müde wirkenden Augen. Dermal resorbierbares Implantat für gealterte Haut rund um das Auge. Die Effekte von nicht vernetzter Hyaluronsäure, erweitert um einen Biokomplex mit Vitaminen, Antioxidantien, Mikrozirkulatoren und Blending/Bleachingsubstanzen. Für die Augen · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	2 Amp. / 1,5 ml
		Box Medium		12 Amp. / 1,5 ml
		Box Large		24 Amp. / 1,5 ml
	RRS® HA STRIMATRIX Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Biostimulationslösung	Box Small	Zur Behandlung von schlaffer Haut, Dehnungstreifen und Narben. Geeignet zur Meso-Hautspannung. Intradermales Implantat aus nicht vernetzter, resorbierbarer Hyaluronsäure verbunden mit einer Biostimulationslösung zur Auffüllung und gleichzeitigen Regeneration der dermalen Matrix. Für den Körper · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	2 Amp. / 10 ml
		Box Medium		6 Amp. / 10 ml
		Box Large		12 Amp. / 10 ml
	RRS® CELLUTRIX Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Biomodulationslösung	Box Small	Ausgleich der Hautoberfläche und Stimulation der Mikrozirkulation. Lokale Fettkorrektur. Bei oberflächlichen Hautunebenheiten. Intradermales Implantat aus nicht vernetzter, resorbierbarer Hyaluronsäure verbunden mit einer Biomodulationslösung, speziell bei Cellulite. Für den Körper · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	6 Amp. / 10 ml
		Box Medium		12 Amp. / 10 ml
		Box Large		
	XL HAIR® Nicht vernetzte Hyaluronsäure* + Biostimulationslösung für Haarwachstum	Box Small	Perfekte Haarstimulation. Zur Restrukturierung der interzellularen Matrix. Intradermales Implantat aus unvernetzter, resorbierbarer Hyaluronsäure verbunden mit einer Biostimulationslösung zur Förderung des Haarwachstums. Bei symptomatischem Haarverlust, Alopecia, diffusem Haarverlust. Für das Haarwachstum · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	6 Amp. / 3 ml
		Box Medium		12 Amp. / 3 ml
		Box Large		
	RRS® SILISORG Organisches Silizium + Resveratrol	Box Small	Für Haut und subkutanes Gewebe, Anti-Aging Regenerations-Stimulator. Reorganisiert die Bindegewebsarchitektur (Elastin-Kollagenfasern) und erhöht dadurch das Hautvolumen. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Für Patienten aller Altersstufen	12 Amp. / 5 ml
		Box Medium		24 Amp. / 5 ml
		Box Large		
	RRS® SILISORG HA Organisches Silizium + Hyaluronsäure + Resveratrol	Box Small	Für Haut und subkutanes Gewebe, Anti-Aging Regenerations-Stimulator, Hydratation. Reorganisiert die Bindegewebsarchitektur (Elastin-Kollagenfasern) und erhöht dadurch das Hautvolumen sowie die Durchfeuchtung der Haut. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 35 und 45 Jahren	12 Amp. / 5 ml
		Box Medium		24 Amp. / 5 ml
		Box Large		
	RRS® SILISORG TENSOR Organisches Silizium + 3 % DMAE	Box Small	Für Haut und subkutanes Gewebe, Anti-Aging Regenerations-Stimulator, kombiniert mit Hautspannungskomplex. Reorganisiert die Bindegewebsarchitektur (Elastin-Kollagenfasern) und erhöht dadurch das Hautvolumen sowie die Hautspannung. Für Gesicht und Körper · Class III Medical Device CE1014 Empfohlen für Patienten zwischen 45 und 65 Jahren	2 Amp. / 5 ml
		Box Medium		24 Amp. / 5 ml
		Box Large		




Fettpölsterchen durch Injektionstherapie reduzieren.



Gerade den hartnäckigen Fettpölsterchen, die bisher jeder Diät oder jedem Training getrotzt haben, kann man mit der Injektionslipolyse hervorragend zu Leibe rücken.

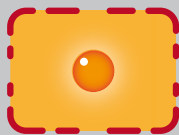

Fett und Zytoplasma befinden sich in der Zelle.

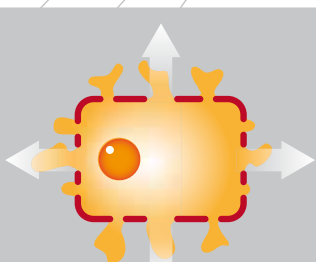

Nach der Injektion treten Fett und Zytoplasma aus.

PPC und DCA haben eine synergetische Wirkung:

Deoxycholate:

- Bricht die Zellmembran
- Fett tritt aus
- Zytoplasma tritt aus
- Folge: Entzündung

Phosphatidylcholin:

- Emulgiert, verseift Fett
- Abtransport zur Leber (Beta-Oxidation)
- Abbau über die Leberfunktion

Bei der Behandlung von Fettpolstern durch Injektion spricht man von der so genannten „**Injektionslipolyse**“. Die Behandlung wird mit einem Kombipräparat durchgeführt. Es besteht aus **PPC** (Phosphatidylcholin) und **DCA** (Desoxycholsäure). PPC wird aus dem Soja-Lecithin der Sojabohne gewonnen. In Deutschland ist die Wirkstoffkombination zur Vorbeugung und Behandlung von Fettembolien (intravenöse Anwendung) sowie zur Senkung eines erhöhten Cholesterinspiegels (in Tablettenform) zugelassen.

Bei der klassischen Fettabsaugung – einem kleinen bis mittlerem chirurgischen Eingriff – wird das Fett mechanisch bzw. physikalisch über eine Absaugsonde aus dem entsprechenden Fettpolster entfernt. In der Regel bleiben kleine Narben zurück. Bei der „Injektionslipolyse“ ist dies anders. Die Fettpölsterchen werden mit dem Wirkstoff buchstäblich „geimpft“. **Durch die Desoxycholsäure wird die Zellmembran der Fettzelle aufgebrochen. Die freigesetzten Stoffe können nun über das Blut und die Lymphe transportiert und abgebaut werden.**

In Deutschland besteht für die Injektionslipolyse keine Zulassung. Die Anwendung erfolgt im „Off-Label-Use“. Im Bereich der Dermatologie ist dies aber keine Seltenheit. In einem ausführlichen Aufklärungsgespräch muss der Patient jedoch speziell auf diese Tatsache hingewiesen werden. Die unmittelbaren Risiken bei der Injektionslipolyse sind im Vergleich zur Fettabsaugung – genau so wie die damit verbundenen Kosten – sehr gering. Die Nebenwirkungen sind teils unangenehm und äußern sich in Rötungen, Schwellungen, Jucken oder Brennen an den Einstichstellen. **Obwohl diese Behandlungsmethode gut wirkt, vollbringt sie bei größeren Fettansammlungen nicht die Wunder, die sich viele erhoffen. Hartnäckigen Fettzellen jedoch kann man gezielt und effektiv zu Leibe rücken.**



Wirkstoffe topisch



Aesthetic Dermal

Meso-Wirkstoffe zur topischen Anwendung			
Präparat	Ampulle	Wirkstoff	Inhalt
Bilobine-G	Brech-Amp.	Gingko Biloba 100 mg	20 x 5 ml - Amp.
Biovita-H	Brech-Amp.	Biotin - Vitamin H 0,1 %	20 x 2 ml - Amp.
Centelliasial	Brech-Amp.	Zellaktivator (Fucus, Centella Asiatica, Hiedra)	20 x 2 ml - Amp.
Cynalcan	Brech-Amp.	Artischocken-Extrakt 2 %	20 x 5 ml - Amp.
Deoxylyse	Brech-Amp.	Natriumdesoxycholot / Auflösung Fettzellen 3 %	20 x 5 ml - Amp.
Dermostabilon	Brech-Amp.	Phosphatidylcholin 5 % (PC) Desoxycholot 2 % (DC)	20 x 5 ml - Amp.
Dermo-B-Com	Brech-Amp.	Vitamin B Komplex	5 x 5 ml - Amp.
Desinfiltral	Stech-Amp.	Hyaluronidase (in Pulver) 1.500 U.I	5 Ampullen
Dexenol	Brech-Amp.	5 ml Dexenol enthält 1.000 mg Panthenol 20 %	20 x 5 ml - Amp.
DM-lift	Brech-Amp.	DMAE reduziert die Faltenbildung 1 % - 50 mg	20 x 5 ml - Amp.
Glicoline	Brech-Amp.	Glykolsäure 1 %	20 x 2 ml - Amp.
GSH	Brech-Amp.	Glutathion 100 mg	5 x 5 ml - Amp.
K-Bromine 20	Brech-Amp.	Koffein 20 %	20 x 2 ml - Amp.
L-Carnitans	Brech-Amp.	L-Carnitin/Fatburner 20 % - 1.000 mg	20 x 5 ml - Amp.
Melirutol	Brech-Amp.	200 mg Steinklee und 50 mg Rutin-Extrakt	20 x 2 ml - Amp.
Purascorbol 20	Stech-Amp.	Vitamin C 20 % / 1,0 gr.	5 x 5 ml - Amp.
Puretinol 300	Stech-Amp.	Retinol (Vitamin A1) 300.000 U.I.	20 x 2 ml - Amp.
Pyrustim	Brech-Amp.	Pyrovat 1 %	20 x 2 ml - Amp.
Silisorg 0,5	Brech-Amp.	Silizium 0,5 %	20 x 5 ml - Amp.
Silamas	Stech-Amp.	Bio-Polymer	5 x 10 ml - Amp.
Silorgamine	Brech-Amp.	(1 ml 5 % DMAE - 4 ml 0,5 % des organ. Silizium)	20 x 5 ml - Amp.
Taurinox	Brech-Amp.	Taurin (Aminosulfonsäure) 1 % - 50 mg	5 x 8 ml - Amp.
Xadenal	Brech-Amp.	Sodium nucleinate (X-ADN) 3 %	20 x 2 ml - Amp.
Xadenal gel	Stech-Amp.	X-ADN Gel	5 x 2,5 ml - Amp.

Zu therapeutischen Zwecken können die Meso-Wirkstoffe von Aesthetic Dermal untereinander auch gemischt werden. So kann je nach Patient die Therapie den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.

**Die Cocktail-Fibel ist da!
Sichern Sie sich gleich Ihr
Exemplar und
rufen Sie an!**


Interessant!

Wissenswertes über Fadenlifting.



Die Technik des „Fadenliftings“ ist viel älter als man vermutet. Bereits im alten Ägypten wurden Fäden in die Haut gezogen um Gesichtszüge zu betonen. Die Funde von Goldfäden in ägyptischen Gräbern bestätigen das. Königin Kleopatra sagt man nach, dass diese Goldfäden der Grund für ihre Schönheit gewesen sein sollen.

Abbildung in Originalgröße

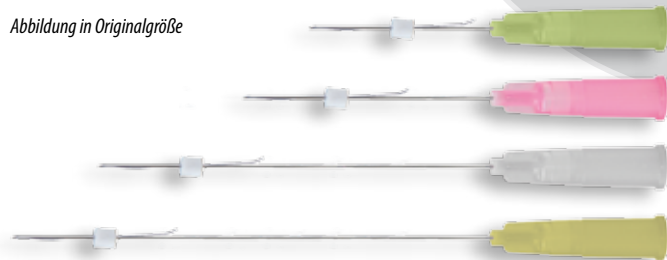

Mit zunehmendem Alter kommt es durch den ständigen Einfluss der Schwerkraft zu einem Verlust an Elastizität, hängende Backen und Erschlaffung des Gewebes am Körper sind die sichtbaren Folgen davon. Mit einem neuen, einfachen, nicht-operativen Verfahren kann man nun die „innere Stützstruktur“ von Haut und Gewebe wirkungsvoll kräftigen.

Das „Fadenlifting“ ist ein minimalinvasives Verfahren. Es erfolgt kein Eingriff wie bei einem Facelift. Es werden einfach mit Hilfe von Nadeln Fäden von außen in die Haut eingezogen. **Die Wirkung beruht auf „Bio-stimulation“** (Anregung des Wachstums neuer Zellen) **und Gewebestützung. Daraus ergibt sich ein deutlicher „Liftingeffekt“.**

Die Fäden bestehen aus PDO(Polydioxanone), ein Material, das bereits in der Gefäß- und Herzchirurgie verwendet wird. Das Einziehen der Fäden erfolgt mit dünnen Nadeln, in denen sich die Fäden befinden.

PDO ist resorbierbar, das heißt, die Fäden lösen sich im Gegensatz zu bisher verwendeten Fäden aus einem nicht abbaubaren Kunststoff nach einigen (6-8) Monaten auf. Daher ist die Behandlung auch sehr gut verträglich. Der volle Effekt ist nach 4-8 Wochen sichtbar. Erst nach dieser Zeit soll eine Beurteilung des Ergebnisses erfolgen. Selten sind Nachkorrekturen erforderlich. Das Ergebnis bleibt länger sichtbar(ca. 12 Monate), da ja durch das Material auch neue Kollagenfasern gebildet werden.

Das Fadenlifting ist vor allem dann die Behandlung der Wahl, wenn eine Hauterschlaffung ohne zu großen Hautüberschuss vorliegt. Für ein ideales Ergebnis kann man das Fadenlifting auch sehr gut mit anderen Methoden (Botulinum-Toxin, Hyaluronsäurefiller, PRP, Mesotherapie oder physikalische Methoden) kombinieren.



Faden-Lifting

- **Sofort sichtbarer Lifting-Effekt**
- **Bessere Durchblutung**
- **Verbesserung der Hautfarbe**



Erfolgreiches Fadenlifting braucht nicht nur geübte Hände, sondern immer auch den richtigen Faden. Je nach Bedürfnis des Patienten gibt es Fäden in verschiedenen Ausführungen und Längen. Die Threadlifting-Technik ist sehr gut verträglich. Die Hautstraffung erfolgt über die einsetzende Collagenese um den eingebrachten Faden herum. Die PDO-Fäden verbleiben nicht in der Haut. Spätestens nach 6-8 Monaten lösen sie sich vollständig auf. Sie werden vom Körper in ihre Grundbausteine Wasser und Kohlendioxid zerlegt.



Threadlifting Nadeln mit PDO-Fäden (Standard)

Bezeichnung	Herstellerbezeichnung	Dicke der Nadel (G)	Länge der Nadel (mm)	Länge des Fadens (mm)	Inhalt
PDO-needle Gesicht	MP	29	25	(30)	100 St.
PDO-needle Gesicht	MP	29	38	(60)	100 St.
PDO-needle Gesicht	MP	25	50	(70)	100 St.
PDO-needle Gesicht	MP	25	60	(90)	100 St.
PDO-needle Körper	MP	29	60	(90)	100 St.

Threadlifting Nadeln mit TWIN-Fäden (gedrehte Fäden)

Bezeichnung	Herstellerbezeichnung	Dicke der Nadel (G)	Länge der Nadel (mm)	Länge des Fadens (mm)	Inhalt
PDO-needle f. starke Falten (z.B. Nasolabial)	MPHC-T	29	38	(50)	100 St.
PDO-needle f. starke Falten (z.B. Nasolabial)	MPHC-T	27	50	(70)	100 St.

Threadlifting Nadeln mit COG-Fäden (Widerhaken)

Bezeichnung	Herstellerbezeichnung	Dicke der Nadel (G)	Länge der Nadel (mm)	Länge des Fadens (mm)	Inhalt
PDO-needle Straffung	MGA	25	60	(90)	40 St.
PDO-needle Straffung	MGA	25	70	(100)	40 St.
PDO-needle Straffung	MGA	25	80	(100)	40 St.
PDO-needle Straffung	MGA	25	80	(130)	40 St.
PDO-needle Straffung	MGA	25	90	(130)	40 St.
PDO-needle Straffung	MGA	25	90	(150)	40 St.

Threadlifting ist ein minimalinvasives Face-Lifting mit resorbierbaren (6 - 8 Monaten) Polydioxanon (PDO) Fäden, welche mit Hilfe von Nadeln von außen in die Haut eingebracht werden. Die Fäden geben dem Gewebe eine neue Stützstruktur. Um den eingebrachten Faden herum bildet die Haut neue Kollagenfasern, die das Hautvolumen erhöhen und so Falten glätten.

Die Vorteile von Threadlifting:

- **unkomplizierter Eingriff (min. invasiv)**
- **praktisch schmerzfrei**
- **sofort sichtbares Ergebnis**
- **lange Haltbarkeit (bis 12 Monate)**
- **praktisch keine Nebenwirkungen**
- **keine Ausfallzeiten**

Threadlifting ist besonders geeignet bei:

- **ausgeprägten Nasolabialfalten**
- **bei Elastizitätsverlust**
- **ausgeprägten Falten in der unteren Gesichtshälfte**
- **erschlafte, hängendem Gewebe**
- **bei Patienten, die keinen operativen Eingriff möchten**
- **bei Patienten, die auf Milchsäure- und Goldfäden allergisch reagiert haben**

Threadlifting wird bei der Behandlung von Gesicht (Stirn, Augen, Wangen, Kinn), Hals, Dekolleté und Körper eingesetzt. Die Nadeln sind **zertifizierte Medizinprodukte**. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, kann die Behandlung jederzeit mit anderen Methoden (Botulinumtoxin, Hyaluronsäurefiller, PRP, Mesotherapie, Needling usw.) kombiniert werden.


SW-PRP Kit



Das **SW-PRP Kit** ist ein medizinisches Gerät, das speziell zum Sammeln und sicheren Trennen von Blut in Plasma und in PRP (Platelet Rich Plasma) entwickelt wurde - einfach, kompakt und sicher.




3 ml ACD-A werden in der Spritze aufgezogen

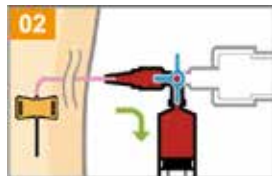


Das Blut wird über das 3-Wege-Ventil entnommen




Blut und ACD-A werden in der Spritze gemischt

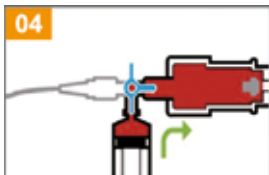


Injizieren Sie das Blut aus der Spritze in das Gerät

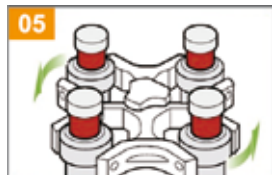


Erstes Zentrifugieren zum Trennen der Komponenten

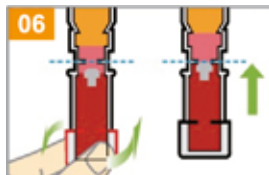


Einstellen des RBC-Levels durch Drehen der Blutkammer-Kappe

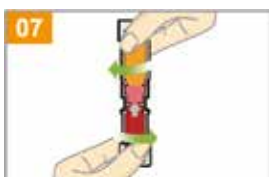

Schließen der RBC-Sperre durch Drehen

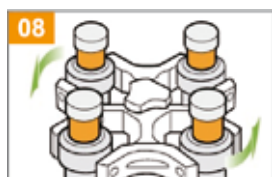

Zweites Zentrifugieren zum konzentrieren des PRP

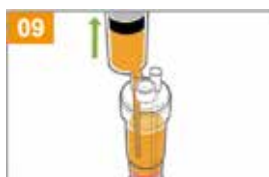


Entnahme des Plasmas bzw. des PRP an den entspr. Entnahmeöffnungen

Das **SW-PRP Kit** bietet 3 entscheidende Vorteile.


1. Geschlossenes 2 in 1-System

Das SW-PRP Kit besteht aus einem einzigen Röhrchen. Entnommenes Blut muss nicht umgefüllt werden. Verunreinigungen sind ausgeschlossen.

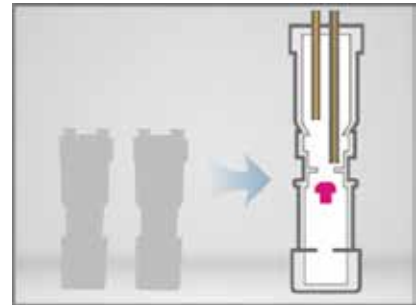

2. One-Step-System

Blutentnahme und Befüllen des Geräts erfolgt in einem einzigen Arbeitsschritt.

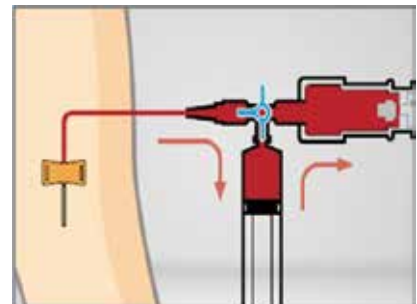

3. Einfache und sichere Handhabung

Nach dem Zentrifugieren können PRP und Plasma problemlos an den dafür vorgesehenen Stellen des Geräts entnommen werden.



SW-PRP Blutzellenertrag

Geschlecht	Anzahl Blutplättchen x 10 ⁹ /mL (20 ml)	Konzentration Blutplättchen x 10 ⁹ /mL (2 ml)	Konzentrations-Spiegel (x Baseline)
Männlich	242	1337,25	5,52 x
Weiblich	223	1225,00	5,49 x

Zentrifuge SW-400



Die **Zentrifuge SW-400** ist eine Mikroprozessor gesteuerte Zentrifuge und mit ihrer Größe von (BxHxT) 390x290x470 mm für den Praxisbetrieb sehr gut geeignet. Der Swing- bzw. Winkelrotor erlaubt eine max. Geschwindigkeit von 4.000 U/min. (inkl. Röhrchenset)

Kraft max.: 2,790 x g (Swing-Rotor)
2,415 x g (Winkel-Rotor)
Kapazität max.: 300 ml (50 ml x 6 Röhrchen - Swing)
Timer: 99 min. und Hold Run
Sicherheit: Geschwindigkeitskontrolle
Überladungskontrolle
Anschluss: 220 V, 50 Hz
Gewicht: 20 kg



Peelings & Daily Skin Care



SKINTECH
advanced skin technologies



Eine ganze Produktfamilie ...
... einfach, zuverlässig, wirksam.

Die häufigsten Anti-Aging Behandlungen sind Peelings. Je nach Tiefe der Hautbehandlung unterscheidet man oberflächliche, mitteltiefe und tiefe Peelings. Mit der **SKINTECH-Product-Range** steht Ihnen nun eine komplette Produktfamilie mit einer Fülle von Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung.

Die SKINTECH-Produkte haben drei entscheidende Vorteile. Sie sind

1. **einfach anzuwenden**
2. **qualitativ hochwertige Medizinprodukte**
3. **ausgezeichnet wirksam**

Zur Optimierung der Peeling-Ergebnisse gibt es von **SKINTECH** zusätzlich die umfassende **Daily Skin Care**. Elf verschiedene Care-Produkte ermöglichen eine hoch individuelle Post-Peel-Behandlung die die Haut nach dem Peeling schützt und Anti-Aging Effekte länger bewahrt. **SKINTECH-PRODUKTE** gehören in jede mesotherapeutische Praxis.

SKIN TECH *Fruchtsäure*

advanced skin technologies

schnell sicher
effektiv einfach

NEU



Patentierter Neutralisator mit Farbwechselindikator für Phototyp I-V, inkl. Feuchtigkeitspflege

Das schnellste und sicherste Peeling Lunch-time-Peeling für Phototyp I-VI, neutralisiert sich selbst



Die Anwendung von Easy Droxy Peel wird durch den Farbwechselindikator „echt easy“.

- neutralisiert
- nicht neutralisiert

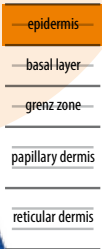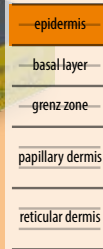

Easy Droxy Peel (5 peels) (1 x 15 ml dickes Gel)
Neutralizer Versicolor (Tube mit 50 ml)

Easy Phytic Solution (25 peels)
(Fläschchen mit 50 ml)

- zur Korrektur der Beschaffenheit der Haut
- Hautunregelmäßigkeiten, -farbe, -textur
- für alle Phototypen/ Hautstärken geeignet
- bei Photo-Aging, Fältchen, dünner Haut
- mit antioxidativen Inhaltsstoffen

- bei Akne, oberflächlichem Melasma
- zur Vorbeugung/Behandlung bei Dychromie
- Dermale Stimulation
- ohne sichtbare Abschuppung
- „Slow-Release“ Technologie

Easy Droxy Peel ist ein dickes Gel, welches auf verschiedenen Hydroxysäuren (Glycol-Milch-Zitrone-Salizyl-Kojic) basiert. Durch diese Säuren werden die Verbindungen zwischen den Keratinozyten geschwächt (Desmosomen). Der **Neutralizer Versicolor** ist eine spezielle Emulsion, welche eine visuelle Kontrolle der Peeling-Neutralisation in Echtzeit durch das Wechseln der Farbe erlaubt.


Easy Phytic Solution ermöglicht eine starke dermale Stimulation. Sie setzt sich aus einer Milchsäuremischung und reinen Mischsäuren mit progressiver und kontrollierter Wirkung zusammen. Glycolsäuren, Milch- und Mandelsäuren neutralisieren sich nicht trotz eines pH-Wertes unter 1. Die Phytic-Säure ist ein starkes Antioxidans. Keine Auswirkungen auf das alltägliche Leben (Ausfallzeiten).

SKIN TECH *Phenol TCA PPM*

advanced skin technologies

Die Stärksten

inklusive
Post Peel
Mask

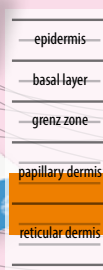

inklusive
Post Peel
Mask



Easy Phen Light - TCA/Phenol Mischung
Phototyp I-III
(1 Amp. Basislösung à 3 ml/ 1 Tube PPMask à 10 ml entspricht 1er Full-Face-Behandlung)

Lip & Eyelid Formula - Phenol in Öl - chemisches Lifting
Phototyp I-III
(1 Amp. Basislösung 3 ml/ 1 Tube PPMask à 10 ml entspr. 15 lokalen Anwendungen oder 1er Full-Face-Behandlung)

- zur Tiefenregeneration der Haut
- bei Photo-Aging
- starke Abschuppung
- Ausfallzeit bis zu 6 Tagen

- zur Tiefenregeneration der Haut
- bei tiefen Falten
- bei Dychromie an Lippen
- bei Dychromie an Augenlidern
- Ausfallzeit bis zu 6 Tagen

Easy Phen Light ist ein Phenolpeeling für Photo-geschädigte Gesichtshaut.

Lip & Eyelid Formula ist ein Phenolpeeling für die Behandlung tiefer Falten im Lippen- und Augenbereich.



Erstes TCA mit Phenol als Anästheticum Phototyp I-V

inklusive Post Peel Mask

NEU



Easy TCA Pain Control (4 peels)
(1 x 8 ml Lösung, 1 x 3,4 ml Activator TCA, 1 x 10 ml PPM)

- bei Photo-Aging, Akne
- Melasma, Cloasma, Hyperpigmentation
- Trockene Haut, Ichthyosis
- Feine Linien
- Keratosen, Lentigine

Easy TCA Pain Control ist als Gesichtspeeling einzigartig. Es ist ca 15% starker als Easy TCA®. Der Phenolanteil dient als Anästheticum. Easy TCA® PC wird gewöhnlich 4 mal wiederholt, nach Entscheidung des Arztes. Die Wiederholungsfrequenz ist eine Behandlung pro Woche im Gesicht. Vier Peeling Sitzungen stellen eine komplett Behandlung dar. Diese können in einem Abstand von mind 6 Wochen wiederholt werden.

Die einzige **Komplett-Peelingreihe** für alle Indikationen.


inklusive Post Peel Mask



Easy TCA 12 (15 % TCA / 12 peels) Phototyp I-VI
(12 Amp. à 2 ml Basislösung/ 3 Tuben PPMask à 10 ml)


- bei Photo-Aging, Dychromie, Keratose
- bei trockener Haut, feinen Fältchen, Akne
- Melasma / Chloasma, Hyperpigmentierung
- oberflächliche bis mittlere Behandlungstiefe
- geringe Ausfallzeit

Easy TCA 12 gilt als das sicherste, effizienteste und einfachste Peeling der TCA-Serie. Eine Pre-Peel Vorbereitung ist nicht erforderlich. Ideal für spezielle Behandlungen von Dekolleté, Händen, Unterarmen, Schwangerschaftsstreifen und Raucherhaut. Kombination mit TCA tief oder Phenol lokalisiert. Verjüngung der Haut.

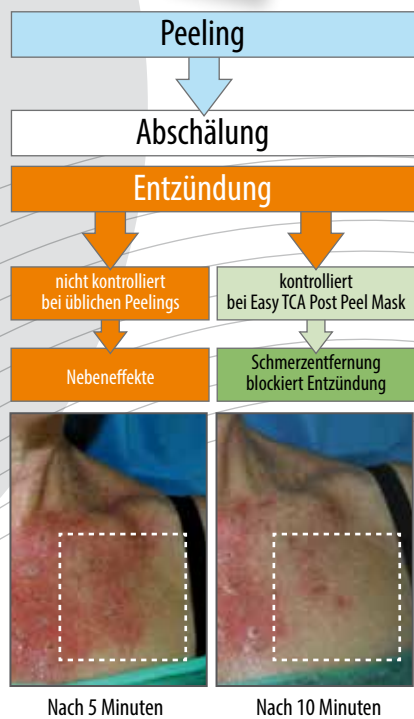

Starkes TCA PPM

inklusive Post Peel Mask

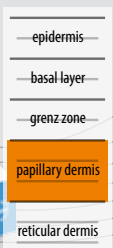

Unideep (25 % TCA / 2 peels) Phototyp I-IV
(1 Amp. à 4 ml Basislösung/ 2 Tuben PPMask à 10 ml)

- zur Tiefenregeneration der Haut
- bei Dychromie, Akne
- Hyperpigmentierung
- Melasma / Chloasma, Keratose
- bei Fältchen
- bei Sommersprossen
- Ausfallzeit bis zu 5 Tagen

Unideep ist ein kombiniertes Peeling (AHA, TCA + Antioxidantien), das bei einer oder zwei Schichten (je nach Hautdicke) im Papillarkörper wirkt. Eine Sitzung (selten 2, mit einem Monat Abstand) für eine Tiefenregeneration der Haut. Unideep kann mit einem oberflächlichen Easy TCA Peeling, Lip & Eyelid Formula oder mit Only Touch kombiniert werden.

inklusive Post Peel Mask



Only Touch (45 % TCA) Phototyp I-III
(1 Amp. à 5,6 ml Basislösung)

- bei Altersflecken
- Lokale und benigne Lentigo
- Keratose des Gesichts und des Körpers von max. 1 cm Durchmesser
- nicht für größere Läsionen

Only Touch ist eines der stärksten TCAs auf dem Markt. Nach Aktivierung ist Only Touch eine konzentrierte, verseifte und stabilisierte Lösung, der mehrere Säuren beigefügt wurden (ca. 45 % m/m TCA, Zitronensäure und Ascorbinsäure).

Easy TCA Post Peel Mask (SPF 15)
(1 Tube à 10 ml Creme)

- entscheidende Kontrolle über die Entzündungsreaktion binnen weniger Minuten
- Sofortige Reduktion von Schmerz/Brennen
- Stimulierung des Heilungsprozesses
- sofortiger UV-Schutz nach dem Peeling
- Ermöglicht und erleichtert die Behandlung der Phototypen 1 - 6 nach Fitzpatrick-Skala

Easy TCA Post Peel Mask blockiert die Entzündung nach dem Peeling. Der Schmerz durch Hitzegefühl/Brennen wird sofort zum Stillstand gebracht. Die Kontrolle über die Nebeneffekte nach dem Peeling ist somit gewährleistet.



SKIN TECH *protective*

advanced skin technologies



IPLase Mask (Beutel 3 ml / Tube mit 50 ml)

- gegen Entzündungen, die durch Behandlungen verursacht wurden
- zur Beruhigung der Haut
- zur Kühlung der Haut
- zum Schutz vor thermischen Schäden

IPLase Mask ist eine Pflegecreme, die nach mitteltiefen und tiefen Peelings der Haut zur Reduzierung der Hautirritationen bzw. Entzündungen aufgetragen wird. Sie hilft das Hitze-/ Brenngefühl auf der Haut einzuschränken und die Hautregenerierung mit dem Ziel ein natürliches Hautbild zurückzuerlangen, zu verstärken.



Melablock HSP SPF 30+ (Tube mit 50 ml)
Melablock HSP SPF 50+ (Tube mit 50 ml)

- für maximalen Sonnenschutz
- mit Heat Shock Proteins (HSP) Induktion
- Schutz vor zellulärer thermischer Lyse
- Schutz vor Proteinvernichtung nach minimaler Temperaturerhöhung

Melablock HSP SPF 30+/50+ sind Sonnenschutzcremes mit mikronisiertem Titandioxid. Sie bieten Schutz vor mehr als 98 % der UVA- und UVB-Strahlen. Täglicher Schutz speziell abgestimmt auf die Nachpflege aller Peeling-, Laser-, Dermabrasionsbehandlungen und Therapien mit pulsierendem Licht. Anwendung um 9:00, 11:00 und 14:00 Uhr.



Vit. E Anti-oxydant (Tube mit 50 ml)

- für sehr empfindlicher Haut
- Schutz gegen freie Radikale nach Peelings, Abreibungen, Sonnenbränden oder Lasern
- Hautschutz gegen äußere Einflüsse
- sofortige, lang anhaltende Hydratation

Vit. E Anti-oxydant ist eine Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die Anwendung erfolgt morgens nach dem Reinigen und vor dem Make-Up. Sie kann nach Laserbestrahlungen, Peelings oder Dermabrasionen bis zu 6 Mal am Tag appliziert werden.

SKIN TECH *active*

advanced skin technologies



Actilift (Tube mit 50 ml)

- schnell sichtbarer Lifting-Effekt
- Verbesserung der epiderm. Abwehrkräfte
- Verbesserung der Hydratation
- Progressive und dauerhafte Aktion
- Kompatibel mit botulinischem Toxin

Actilift ist eine Feuchtigkeitscreme mit Straffeffekt. Die Anwendung erfolgt während der ersten vier Wochen morgens und abends, danach einmal pro Tag.



Atrofillin (Tube mit 50 ml)

- Verbesserung des Hautvolumens
- Verbesserung der Spannkraft
- Verbesserung der Hydratation
- glättende Wirkung
- strahlenderes Hautbild

Atrofillin ist eine Tagespflegecreme zur Hautaufhellung und zur Verbesserung des Hautvolumens. Die spezielle Kombination der aktiven Inhaltsstoffe ist ideal für die Verbesserung von Hauttonus und -helligkeit.



Nutritive Cream (Tube mit 50 ml)

- für sonnengeschädigte Haut, Raucherhaut
- zur Vorbeugung gegen Oxidationsschäden nach Sonnen-, chemischen- oder Laserverbrennungen
- antioxidative Hydratation
- zur Reduzierung von Neben-Erythemen

Nutritive Cream ist eine Anti-Aging Creme. Die Anwendung erfolgt morgens als Ergänzung mit **VIT-E Anti-Oxydant** oder mit **DHEA-Phyto**.



DHEA-Phyto Cream (Tube mit 50 ml)

- zur Hydratation der Haut ab 40 Jahren
- Schutz gegen freie Radikale
- für das Gleichgewicht der Hautimmunität
- alleine oder in Kombination mit Peelings bei Anti-Aging Behandlungen anwenden

DHEA-Phyto Cream ist eine Anti-Aging Creme. Die Anwendung erfolgt morgens nach dem Reinigen und vor dem Auftragen der Sonnencreme.



Purifying Cream (Tube mit 50 ml)

- zur Befreiung von Unreinheiten der Haut aufgrund hormoneller Störungen bei Jugendlichen oder im reifen Alter
- Pre-Peelvorbereitung und tägl. Behandlung nach Peelings aufgrund einer Aknebehandlung

Die Anwendung der Purifying Cream erfolgt morgens auf dem ganzen Gesicht und abends nur an den befallenen Stellen. Die Creme wird zwischen den Peelings und 6 Wochen nach dem letzten Peeling angewendet.



optimiert den PH-Wert der Haut auf 5,5

Cleanser (Flasche mit 150 ml)

- zur sanften Elimination aller angesammelten Unreinheiten auf der Haut
- wird von sensibilisierter Haut durch dermatologische Behandlungen perfekt vertragen
- keine Veränderung der Hautpermeabilität

Blending Bleaching Cream ist ein Reinigungsschaum für empfindliche Haut. Er wird morgens und abends leicht kreisförmig einmassiert und mit Watte oder Kleenextuch abgewischt.

SKINTECH *specific*

advanced skin technologies



Purigel (Tube mit 50 ml)

- zur Befreiung von Unreinheiten der Haut, die aufgrund von hormonellen Störungen bei Jugendlichen oder im reifen Alter hervorgerufen werden
- für die Langzeit-Pflegebehandlung

Die Anwendung des Purigels erfolgt morgens auf dem ganzen Gesicht und abends nur an den befallenen Stellen. Das Gel wird nach einer medizinischen Aknebehandlung mindestens 6 Monate lang angewendet.



Blending Bleaching Cream (Tube mit 50 ml)



- bei post-entzündlicher, hormonell bedingter Hyperpigmentierungen, Melasma / Chloasma
- zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Post-Laser-Hyperpigmentierungen, Peelings, Dermabrasion und Epilation

Blending Bleaching Cream ist eine Depigmentierungscreme. Die Anwendung erfolgt morgens auf dem ganzen Gesicht und abends nur an den befallenen Stellen. Nach einer med. Depigmentierung mind. 6 Monate lang anwenden.

princess[®]

Princess[®] ist eine neue auf SMART basierende Produktgeneration, die für das gesamte Spektrum der Hautbehandlungen entwickelt wurde.

Princess[®]-Produkte dienen zur Korrektur von feinen bis tiefen Falten und Narben, zur Volumenauffüllung der Lippen sowie zur Hydratisierung und Verjüngung der Haut.

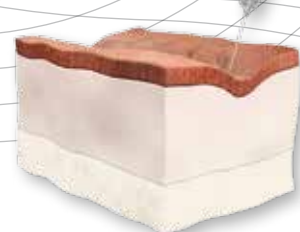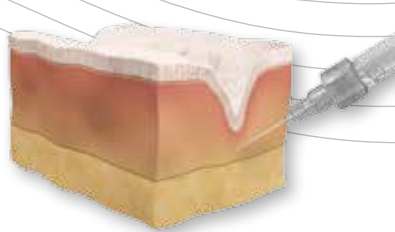

Princess[®]-Filler

Hyaluronsäure-Filler für die Korrektur oberflächlicher und mäßig tiefer Falten

Princess Filler 23 mg / ml
1 x 1 ml Spritzampulle
27G Nadeln

Princess[®]-Volume

Hyaluronsäure-Filler für die Korrektur tiefer Falten

Princess Volume 23 mg / ml
1 x 1 ml Spritzampulle
27G Nadeln

Princess[®]-Rich

Hyaluronsäure unvernetzt für die Mesotherapie

Princess Rich 18 mg / ml
1 x 1 ml Spritzampulle
30G Nadeln
stabilisiert mit Glycerin



Die *schlanke Produkt-Linie* ...
... für ein *breites Anwendungsspektrum*.

Filler



Die Produkte der **Princess®-Linie** werden von **CROMA PHARMA** hergestellt. Die Produktion unterliegt permanenter und strenger Kontrolle. Das sichert gleichbleibend hohe Produktqualität.



Hyaluron Vliesmaske

Die Hyaluron Vliesmaske trägt signifikant zur Zellerneuerung und zum Zellwachstum bei. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe in der Haut.

Die Hyaluron Vliesmaske verstärkt die natürliche Hydratation. So werden Elastizität, Festigkeit und ein natürlich frisches Aussehen der Haut wiederhergestellt.




Vliesmaske Grüner Tee

Die Vliesmaske Grüner Tee beruhigt durch Stress, Müdigkeit, Luftverschmutzung oder durch ästhetische Behandlung strapazierte Haut. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.


Dank ihrer Zusammensetzung lindert sie Irritationen der Haut, unterstützt ihre Regeneration und gibt ihr ein weiches, entspanntes und gesundes Aussehen.



Die Bewährte

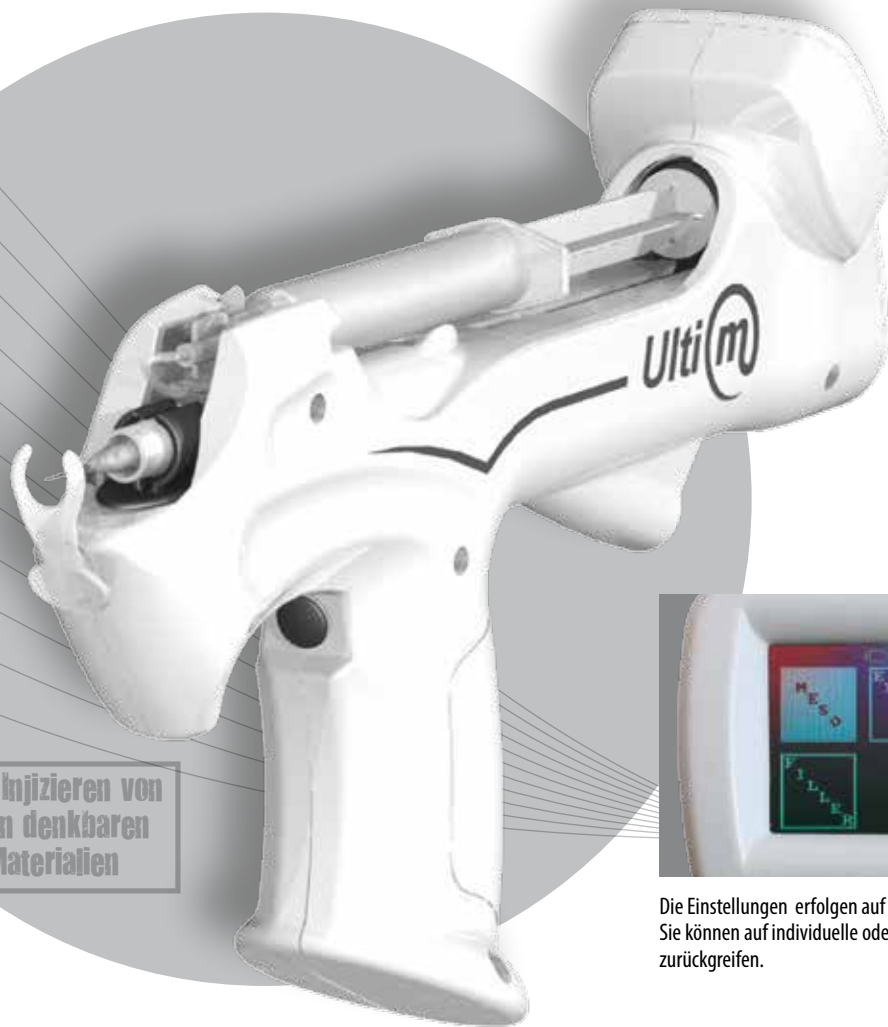


zum Injizieren von
allen denkbaren
Materialien

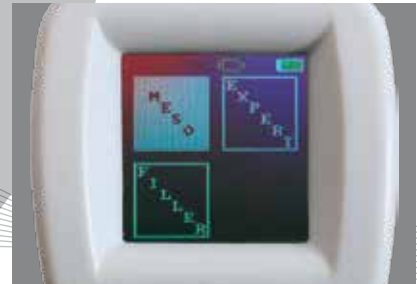

Die Einstellungen erfolgen auf der Pistolenrückseite. Sie können auf individuelle oder voreingestellte Werte zurückgreifen.

Die Behandlungseinstellungen immer im Blick.

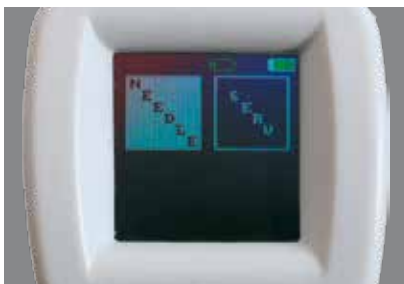

Mesopistole AAMS Ulti(m) (Meso und Filler)

Ist eine voll elektronisch gesteuerte Pistole. Sie arbeitet rückschlagsfrei und sehr leise. Der Griff ist ergonomisch geformt.

- **autom. Erkennung der Spritzengröße**
- **für alle gängigen Spritzengrößen geeignet (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml)**
- **beleuchteter Injektionspunkt**
- **Akkuladezeit 1 Std.**
- **Akkulaufzeit 40 Std.**
- **Abstandshalter mit Massagefunktion**
- **Gewicht (inkl. Akku) ca. 500 g**

Einstellungen

Tiefe, Spritzengröße, Nadellänge, Geschwindigkeit, Injektionsmenge, Art der Injektion, Quaddel, Nappage.

Die **AAMS Ulti(m)** ist zum Injizieren von hochviskosen Substanzen (Fillermaterial) bestens geeignet. Sie können auf eingespeicherte Behandlungsprogramme zurückgreifen. Alle Funktionen werden auf einem Farbdisplay per Touch-Panel kontrolliert und eingestellt.

Verbrauchsmaterial

Schlauchsystem 50er



Für Meso-, Filler- und
... Carboxy-Therapie

Eine für alles



Auch für
Fertigspritzen
bestens geeignet



Die Abstandshalter der AAMS Concerto bzw. Ultim sind mit einer Massagefunktion ausgestattet.



Die AAMS Concerto ist die einzige Mesopistole mit integrierter Carboxy-Funktion

Mesopistole AAMS Concerto (Meso, Filler und Carboxy)

ist voll elektronisch gesteuert. Sie entspricht der AAMS Ultim jedoch mit zusätzlicher Carboxy-Funktion. Sie ist die einzige Pistole, die alle Behandlungen abdeckt.

- **autom. Erkennung der Spritzengröße**
- **für alle gängigen Spritzengrößen geeignet**
(1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml)
- **inkl. Carboxy-Funktion**
- **beleuchteter Injektionspunkt**
- **Akkuladezeit 1 Std.**
- **Akkulaufzeit 40 Std.**

- **Abstandshalter mit Massagefunktion**
- **Gewicht (inkl. Akku) ca. 500 g**

Einstellungen


Tiefe, Spritzengröße, Nadellänge, Geschwindigkeit, Injektionsmenge, Art der Injektion, Quaddel, Nappage.

Die **AAMS Concerto** ist zum Injizieren von hochviskosen Substanzen (Fillermaterial) bestens geeignet. Sie können auf eingespeicherte Behandlungsprogramme zurückgreifen. Die Pistole kann mit großen und kleinen CO₂-Kartuschen betrieben werden. Alle Funktionen werden auf einem Farbdisplay per Touch-Panel kontrolliert und eingestellt. Der Akku ist innerhalb einer Stunde vollständig geladen und hält ca. 20 Stunden.

Verbrauchsmaterial

Schlauchsystem kurz 50er
Schlauchsystem lang 20er (Carboxy)

Die Klassiker

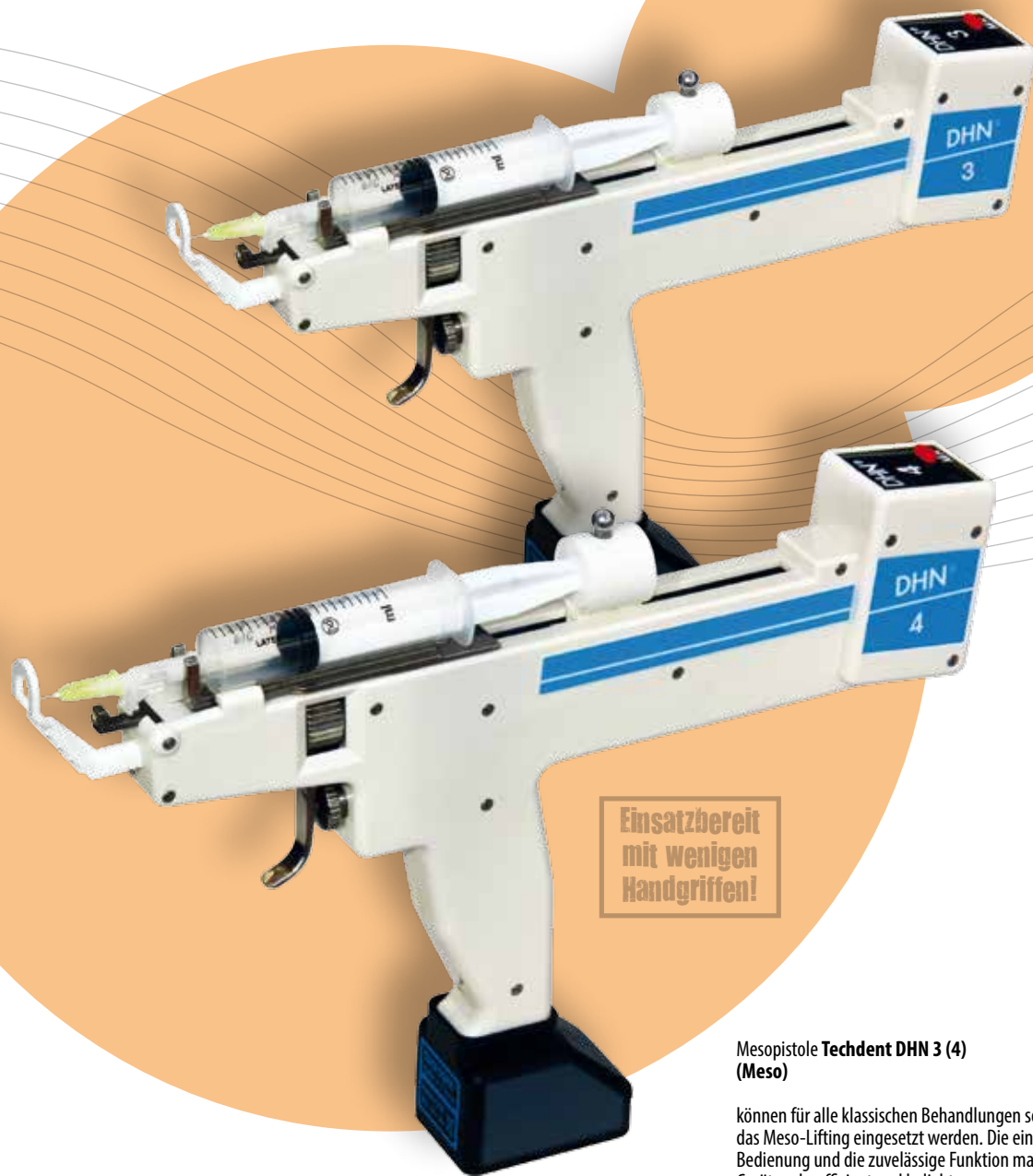

Einsatzbereit
mit wenigen
Handgriffen!

Mesopistole Techedent DHN 3 (4) (Meso)

können für alle klassischen Behandlungen sowie für das Meso-Lifting eingesetzt werden. Die einfache Bedienung und die zuverlässige Funktion machen diese Geräte sehr effizient und beliebt.

- Funktionsmodus Einzel- bzw. Dauerschuss
- Gewicht (inkl. Akku) ca. 500 g

Einstellungen

Tiefe, Geschwindigkeit, Injektionsmenge (elektronisch ausgelöst), Nappage.

Die Techedent DHN 3 entspricht der DHN 4 hat jedoch folgende Zusatzausstattung:

- Injektionsmenge
- Injektionsgeschwindigkeit
- die ausgewählten Funktionen werden durch LED's visualisiert

Verbrauchsmaterial

Nadel, Spritze, Ventil, Abstandshalter

Beide Mesopistolen sind für den Akkubetrieb vorgerüstet. Wer sich schon immer ein Plus an Bewegungsfreiheit gewünscht hat, sollte den Akku als Zusatzausstattung unbedingt mitbestellen.



Über eine leichtgängige Drehschraube kann der Abstandshalter voreingestellt werden.





Die Universelle



Die Mesopistole **Euromi Dermalic 1** ist im Handumdrehen startklar gemacht. Leuchtdioden auf der Pistolentrückseite gewähren permanente Kontrolle während der Behandlung. Die robuste Ausführung macht dieses Gerät zum „Marathonläufer“ Ihrer Praxis.



Mesopistole **Euromi Dermalic 1** (Meso)

ist eine Kompressor gesteuerte Mesopistole für den universellen Einsatz. Zum Arbeiten muss die Pistole mit einem geeigneten Kompressor verbunden sein.

- für den universellen Einsatz
- aus eloxiertem Aluminium
- sehr robust
- Gewicht (inkl. Akku) ca. 600 g

Einstellungen

Tiefe, Geschwindigkeit, Injektionsmenge.

Die **Euromi Dermalic 1** ist zum Injizieren von hochviskosen Substanzen (Fillermaterial) bestens geeignet. Die Akkuladungszeit beträgt 3-4 Std. und hält ca. 6 Stunden.

Verbrauchsmaterial

Nadel, Spritze, Schlauch, Abstandshalter

Radio-Frequenz

die Meso-Alternative ohne Nadeln

ExcellDermPro


ExcellDerm Pro mit N.T.U.R.-Technologie (nicht thermische unipolare Radiofrequenztherapie) **Zur traditionellen Meso-therapie ohne Nadel.**

Mit der N.T.U.R.-Methode können erwünschte Medikationen zuverlässig und höchst effizient in die erforderliche Hauttiefe eingebracht werden. Haupteinsatzgebiete von ExcellDerm Pro:

- schlaffe Haut, Fältchen, Augenringe
- Cellulite, Schwangerschaftsstreifen
- Anti-Aging, Melasma
- Haarausfall
- Schmerztherapie

Vorteile von ExcellDerm Pro:

- schmerzfrei
- ohne Nadeln
- keine Ausfallzeiten
- ideal kombinierbar mit Micro-Needling

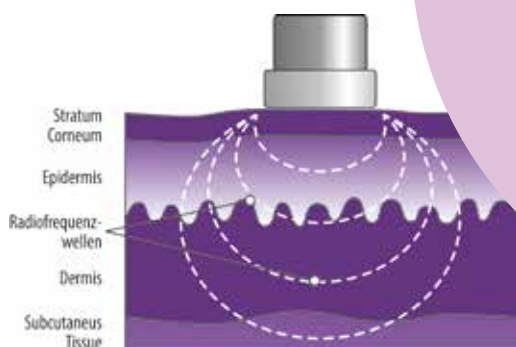




Die Wirkungsweise von N.T.U.R.

Die N.T.U.R.-Technik ist revolutionär. Die Behandlung erfolgt ohne Nadeln und ist absolut schmerzfrei. Sie löst eine Form von „biologischem Stress“ aus und verändert so für die Dauer der Behandlung die Zellmembran (Elektroporation der Lipiddoppelschicht). Zwei Kanäle der Zellmembran (Proteinkanäle) und Poren in der Zelle werden geöffnet. Die Aufnahmefähigkeit der Zelle wird dadurch vergrößert. Aquaporine spielen eine zusätzliche Rolle. Diese Proteine, bilden Kanäle in der Zellmembran, die den Transport von Wasser und anderen Molekülen erleichtern. Wirkstoffsubstanzen können mit der N.T.U.R.-Technik die Zellmembran also leichter passieren und genau dort hingebracht werden, wo sie die Haut am meisten benötigt.




Die nicht thermische unipolare Radiofrequenztherapie öffnet Kanäle in der Zellmembran, die die Aquaporine gebildet haben. Der Durchtritt von Wasser und anderen Molekülen wird erleichtert. Wirkstoffe gelangen so auf direktem Weg dorthin, wo sie gebraucht werden.

Wirkungstiefe Mesococktail (topisch)

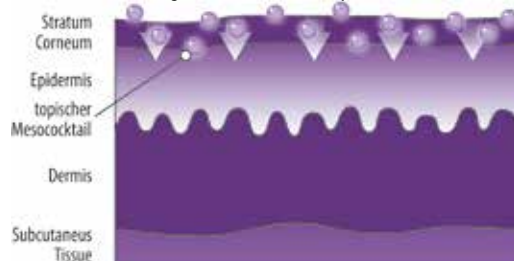

Wirkungstiefe Mesococktail (ExcellDerm Pro)

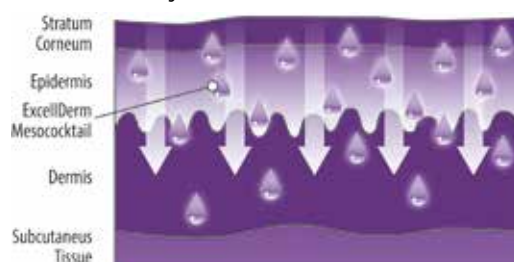

ExcellDerm Pro kann jederzeit auch als platzsparendes Tischgerät eingesetzt werden.

Micro-Dermabrasion ...

... Erste Hilfe für Ihre Haut.

In jungen Jahren ist die Haut fit. Sie hat keine Probleme alte Hautschichten abzustoßen. Im Alter und bei zunehmenden Umwelteinflüssen hingegen wird das schnell anders. Haut verhornt. Aufgetragene Pflegeprodukte werden durch die Hornschicht regelgerecht blockiert und können nur einen Bruchteil ihrer Wirkung entfalten. Die Haut bildet zwar nach wie vor neue Hautzellen, allerdings langsamer. Wenn sie oben ankommen, sind diese Zellen schon wieder alt oder verkrustet. Der Sauerstoffaustausch wird beeinträchtigt.



Bereits beim ersten Eincremen danach spürt man den beeindruckenden Effekt der Micro-Dermabrasion.



Neu gebildete Hautzellen können bei zunehmendem Alter das Hautbild nur sehr wenig oder gar nicht verbessern, wenn man nicht mithilft.

Durch eine Dermabrasion wird das Hautbild schon nach der ersten Behandlung strahlender, jugendlicher und frischer. Die Durchblutung wird verbessert. Durch das Abtragen der abgestorbenen Hautzellen kann die Haut plötzlich wieder frei atmen. Der Zellerneuerungsprozess läuft an: Bindegewebsfasern, Kollagen und Elastin werden stimuliert. Die Haut wird flexibler. Hautunreinheiten verschwinden, Fältchen werden gemildert, die Haut wird glatter, weicher, straffer.

Mit einer Mikro-Dermabrasion können die normalen Abläufe reaktiviert werden. Sie ist die ideale Vorbereitung für eine Wirkstoffbehandlung.



Dermatologisches Behandlungsset

Zur manuellen Dermabrasion.

- für den manuellen Einsatz
- verschiedene Körnungen
- steril verpackt



Dermapabrasion

punktgenau kontrollierbar



Deep Clean

Deep Clean ist das ideale Gerät für die **kontrollierte Dermapabrasion**. Es wird eingesetzt bei:

- Hypertrophen Narben
- Dehnungsstreifen
- Folgen von Akne/Windpocken
- Altersflecken
- Peeling für Gesicht und Körper

Die Vorteile von **Deep Clean** auf einen Blick:

- natürliche Behandlung durch Korundinkristalle
- Leicht zu bedienen
- nahezu schmerzfrei
- hervorragend kontrollierbar
- keine Anästhesie erforderlich
- keine chemischen Substanzen

Technische Eigenschaften

- Netzanschluss 230 V, 50-60 Hz, $\pm 10\%$ (115 V, 50 - 60 Hz, $\pm 10\%$ auf Anfrage)
- LCD-Display, alphanumerisch 240 x 128
- Programmierbare Behandlungszeit bis 99 Min.
- 1 Ausgangskanal
- Einstellungsleistung von 10 - 100
- Maße BxHxT: 41 x 92 x 36 cm
- Gewicht: 32 kg



Die für die Behandlung notwendigen Mikro-Korundinkristalle werden auf der Geräterückseite eingefüllt bzw. in einem separaten Zylinder wieder aufgefangen. Einweg-Verschlußkappen garantieren absolute Hygiene und Sicherheit für Bediener und Patient.

Elektroporation

Wirkstoffe an Ort und Stelle

Lift Skin

Das ideale Gerät für die **Elektroporation**, die **Chromotherapie** und **Anti-Aging Ultraschallbehandlungen**. Das optimale Tool zum **Einschleusen von Wirkstoffen**. Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert. **Lift Skin** sichert Behandlungserfolge:

- **sichtbare Anti-Aging Effekte im Gesicht und am Körper bereits nach einer Sitzung**
- **Straffung und Festigung des Gewebes**
- **Reduzierung von Orangenhaut**
- **Reduzierung von Fettgewebe/Dehnungsstreifen**

Technische Eigenschaften

- **Netzanschluss 230 V, 50-60 Hz, $\pm 10\%$ (115 V, 50 - 60 Hz, $\pm 10\%$ auf Anfrage)**
- **LCD-Display, 240 x 128**
- **Programmierbare Behandlungszeit bis 99 Min.**
- **3 Handstücke**
- **2 Ausgangskanäle**
- **12 eingespeicherte Programme**
- **Maße BxHxT: 51 x 92 x 34 cm**
- **Gewicht: 32 kg**



36



Unterschiedliche Handstücke arbeiten zuverlässig. Sie ermöglichen jede Form von individueller Behandlung.



Magic Pen

Tattoos sicher entfernen

NEU

Magic Pen


Der Magic Pen eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten der Tattoo-Entfernung. Der Magic Pen arbeitet mit der neuen T.E.P.R.-Technologie (trans epidermal pigment release). Eine Laserbehandlung ist teuer und muss immer auf die jeweilige Farbe und Ausführung des Tattoos abgestimmt werden.

Der Magic Pen entfernt:

- jede Farbe
- jede Tinte
- jede Qualität
- in jeder Tiefe
- ohne Verbrennen
- bis Phototyp 5
- schmerzlos

Durch die gezielte Injektion eines speziellen Milchsäurecocktails nach vorgegebenem Raster in die betreffenden Hautschichten, werden die Tattoopigmente gelöst und schrittweise an die Hautoberfläche befördert. Dort verkrusten sie und fallen schließlich von der Haut ab.

In 4 - 5 Behandlungen, die sich in der Regel über eine Zeitspanne von 5 - 6 Monaten erstrecken, können Sie mit dem Magic Pen problemlos Tattoos entfernen und die normale Hautfarbe des Patienten wiederherstellen.

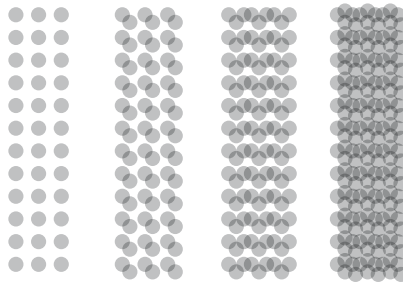

Bei jedem Behandlungsschritt wird das Raster so lange verschoben, bis die Tattoofläche komplett behandelt ist.



Die Lieferung des Magic Pen erfolgt rundum geschützt im stabilen Kunststoffkoffer mit Zahlenschloss.



Die Injektionen erfolgen durch eine Rasterschablone. Die Pigmente werden gelöst und wandern jetzt mit jedem Hautwechsel schrittweise in Richtung Hautoberfläche.


Bei Schritt 2 und 3 wird das Raster entsprechend verschoben. An der Hautoberfläche angekommen verkrusten die Pigmente und fallen schließlich schmerzlos ab.

Micro-Needling


Normale Applikation



Die Haut wird durch Umwelteinflüsse geschädigt.
(Rauchen, Stress, UV-Licht, Toxine)

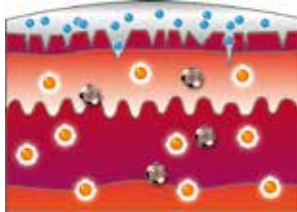


Bei der konventionellen Kosmetik gibt es bis zu 99 % keinen Effekt – die Moleküle sind zu groß.

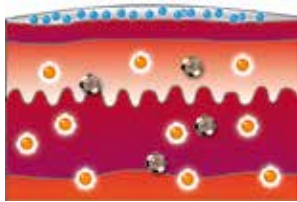


Die Moleküle können nicht in die Haut eindringen.
Die Folgen sind weniger als 0,3 % Effektivität.


Micro-Needling Applikation

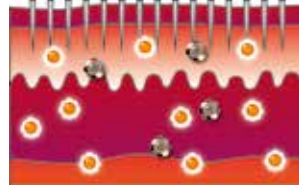

Micro-Penetrationskanäle werden in die Haut eingebracht.

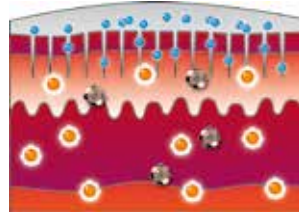

Durch die Micro-Penetrationskanäle gelangen die Wirkstoffe tief in die Haut.

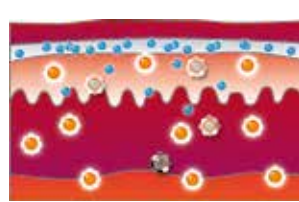

Die Micro-Penetrationskanäle schließen binnen 5 - 60 Min. Zellmembran und DNA beginnen mit der Regeneration.

Bei Pflegecremes erreichen 99 % des aufgetragenen Produktes nicht die richtige Tiefe in der Haut. Die natürliche Schutzfunktion der Haut versperrt mancher Anti-Aging Maßnahme buchstäblich den Weg. Die natürliche Blockadefunktion des „stratum corneum“ könnte man hier zwar durch ein chemisches Peeling (TCA) oder durch eine Abrasion umgehen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit: **Das Micro-Needling.**

Beim Micro-Needling werden der Haut **Micro-Verletzungen** zugefügt. Dabei werden durch die Akupunkturadeln des Mesorollers oder des elektrischen Handgeräts Hautzellen stimuliert, aber nicht zerstört. Im Grunde wird ein **latenter Wundheilungs-Prozess** ausgelöst, der die oberste Hautschicht verjüngt (Teint) und die Fibroblasten stimuliert mehr Kollagen zu bilden. Das Bindegewebe wird gestärkt. **Es tritt eine Hautstraffung ein.** Das **Micro-Needling** ist aber nicht nur der Auslöser für den latenten Wundheilungs-Prozess sondern vor allem der **Micro-Türöffner durch die Haut.** Während der Behandlung können Wirkstoffe eingeschleust werden, die ihre Wirkung dann in der jeweils gewünschten Hauttiefe entfalten können. Die Anti-Aging Effekte werden dadurch nicht nur enorm verstärkt, sondern vor allem länger haltbar gemacht.

Das Micro-Needling eignet sich

- zum Einschleusen von Wirkstoffen
- zum Kollagenaufbau bei sonnengeschädigter Haut und bei Fältchen
- bei Hyperpigmentierung und Melasma
- bei großen Poren mit einhergehender übermäßiger Talgabsonderung
- bei Dehnungs- und Schwangerschaftsstreifen
- zur Behandlung von Narben



Nukleus mit gesunder DNA



Wirkstoff




Nukleus mit geschädigter DNA



ADRollTD® + Stamp

- keimfreie Verpackung
- verschiedene Nadelstärken
- Leichtlauf-Perforationsrad
- zusätzlicher Nadelstempel im Griff

Die ADRollTD® erfüllt alle Anforderungen an den mesotherapeutischen Praxisalltag. Je nach Druck wird die Hautoberfläche für die Behandlung perforiert. Behandlungstechnischer Clou ist der in den Griff integrierte Perforierstempel. Mit ihm kommt man genau dorthin, wo man mit der Rolle aufgrund ihrer Größe nur schwer hinkommt.

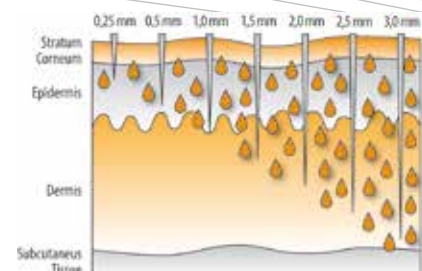

Die Stellen, die für die die Perforationsrolle zu groß sind ...



... erreichen Sie mit dem integrierten Perforationsstempel

NEU



DNC Micro-Nadelroller

- keimfreie Verpackung
- verschiedene Nadelstärken
- Leichtlauf-Perforationsrad
- Wechselkopf
- integriertes Rotationsgelenk

Der DNC Micro-Nadelroller ist für den mesotherapeutischen Praxisalltag wie geschaffen. Das Perforationsrad kann – je nach Bedarf – jederzeit gewechselt werden. Das Rotationsgelenk erleichtert die Behandlung auf absolut durchdachte Weise: Egal um welche Kurve es geht, man muss sich nur auf den gleichmäßigen Druck konzentrieren.



Der Nadelkopf ist im Handumdrehen gewechselt.



Die rote Manschette nach hinten ziehen. Kopf abziehen




Das Rotationsgelenk macht jede Behandlung leichter



Der RollerJet wird per Spritze mit Wirkstoff befüllt



Kollagenstruktur vor der Therapie

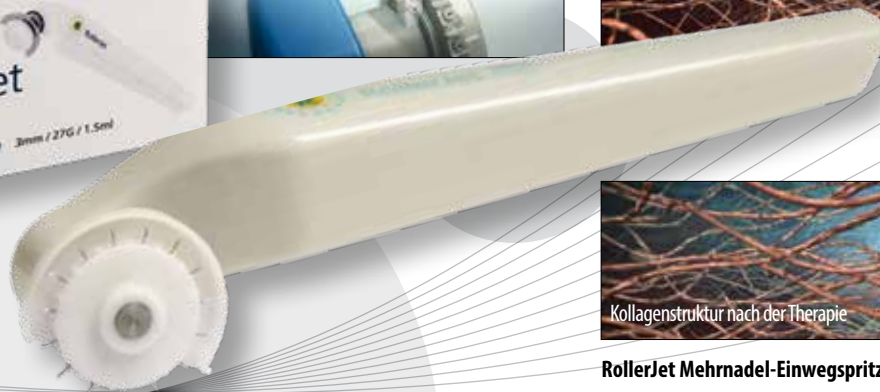

Kollagenstruktur nach der Therapie

RollerJet Mehrnadel-Einwegspritze

- keimfreie Verpackung
- verschiedene Nadelstärken
- Perforationsrad mit automatischer Injektionsfunktion

Die RollerJet Mehrnadel-Einwegspritze ist das ideale Gerät für das manuelle Einbringen von genau abgemessenen Wirkstoffmengen in die Haut. Das Perforationsrad hat zur optimalen Kontrolle der Behandlung nur eine Nadelreihe. Der RollerJet ist mit 1,5 ml Wirkstoff gefüllt und funktioniert absolut zuverlässig.



Durch Abrollen wird der Wirkstoff injiziert ...



... und befindet sich genau dort wo er gebraucht wird.

Elektrisches Micro-Needling

Durch den Akkubetrieb
haben Sie bei der Behandlung
absolut freie Hand.



Luventas Micro-Needling Stick

für das elektrische Microneedling

- für den universellen Einsatz
- aus eloxiertem Aluminium
- sehr robust
- kabelloser Akkubetrieb
- inkl. Zweit-Akku

Einstellungen

- Tiefe (0,25 - 2,5 mm)
- Geschwindigkeit

Inhalt

Luventas Micro-Needling Stick,
Zweit-Akku
2 steril verpackte Nadelköpfe
Netzkabel
Gebrauchsanweisung



40

MY M Micro-Needling Stick

für das elektrische Microneedling

- für den universellen Einsatz
- aus eloxiertem Aluminium
- sehr robust

Einstellungen

- Tiefe (0,25 - 2,1 mm)
- Geschwindigkeit

Inhalt

• Micro-Needling Stick
• Netzkabel
• Gebrauchsanweisung





RUMI Homecare

Fünf Behandlungsarten gleichzeitig in nur einer Behandlung

kabelloser
Akkubetrieb



Die Steuerung des Geräts erfolgt über einen einzigen Eingabeknopf und ist kinderleicht.



Die hochglanzverchromten Behandlungskontakte ermöglichen ein absolut störungsfreies Gleiten.



LED Lichttherapie

Blaues Licht hat eine antibakterielle Wirkung z.B. bei Akne. Es hilft die Haut zu reinigen, stabilisiert die Öl-Drüsen und mindert Entzündungen.

Gelbes Licht reduziert Rötungen, Schwellungen und Entzündungen. Es verleiht der Haut mehr Glanz. Besonders wirkungsvoll bei Rosacea oder Sonnenbrand.

Rotes Licht hat die Möglichkeit in alle Schichten der Haut zu gelangen. Es stimuliert Kollagen, fördert zelluläre Prozesse und ermöglicht eine leuchtende, jugendliche Hautfarbe.



EMS

Elektrische Muskelstimulation auch bekannt als (NEMS) „Neuro Elektrische Muskelstimulation“ oder „Elektro-Myostimulation“, ist eine Reizung der Muskelkontraktion durch elektrische Impulse. Der Strom arbeitet zufällig und stimuliert das Muskelgewebe sehr sanft. Es wird eine sekundäre Bewegung des Muskels hervorgerufen, welche die Elastizität und Geschmeidigkeit der Haut bewahrt.



Vibration

Die Vibration ist wie eine Massage, eine Manipulation oberflächlicher und tieferer Bindegewebsschichten und Muskeln. Sie unterstützt den Heilungsprozess, reduziert Muskelreflexe, hemmt Moto-Neuron, senkt die Schmerzempfindlichkeit und entspannt.



Elektroporation

Bei dieser Behandlungsmethode wird mit einem langen elektrischen Impuls die phospholipide Doppelschicht gestört und temporär mit winzigen Löchern versehen. Dies ermöglicht eine Penetration von Wirkstoffen. Im Vergleich zur Meso-therapie mit Nadeln erlaubt diese Methode eine Penetration ohne Schmerz und Nebenwirkungen.



Radiofrequenz

Eine Behandlung mit Radiofrequenz (90 Hz) kann die Körpertemperatur in kurzer Zeit stark ansteigen lassen. Der Hitzeeffekt kann das Gefäßsystem erweitern und dadurch den Blutfluss erhöhen. Die RF Behandlung ist effektiv bei verschiedenen Arten von Schmerzsymptomen, Haut-Boosting, Hauterneuerung, Faltenreduktion und für das Verändern von Hautkonturen.

Rumi Heimpflegerät

Praktisches Handgerät zum Einschleusen von Wirkstoffen. Ideal für die selbstständige Pflege zuhause und für unterwegs.

- für den universellen Einsatz
- aus eloxiertem Aluminium
- einfache Bedienung

Einstellungen

- 3 Stärkestufen


Inhalt

Handgerät inkl. Akku
Ladestation, Netzkabel
Gebrauchsanweisung
Reisebeutel

Service-Telefon: 044 687 7139





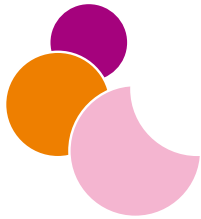


QUEENSKIN GmbH
+ SABAMED-EIN TEAM

aesthetic innovations

